

## ANLEITUNG FÜR TRANSPORTBOXEN

In nur 5 Schritten fertig zum Versand!

### 1 Transportbox

Die Transportbox bitte für die Lagerung und den Transport der am Patienten eingesetzten Medizinprodukte verwenden.

Anlagen/Inhalt: Übergabeschein, transparente Kunststoffbeutel zur Verpackung der Produkte plus Plomben zum Verschließen der Transportbox .

### 2 Vorbereitung der Medizinprodukte

Bitte reinigen Sie die Medizinprodukte entsprechend der Anleitung für die Vorbereitung im Krankenhaus.

### 3 Verpacken und Labeln

Packen Sie jedes vorgereinigte Medizinprodukt einzeln mit den jeweiligen Original-Herstellerinformationen/Original-Herstellerlabel\* in den dafür vorgesehenen transparenten Kunststoffbeutel. Prüfen Sie die Transportbox auf Vollständigkeit:

- Medizinprodukte-Verpackung
- Übergabeschein
- Original-Herstellerinformationen/Original-Herstellerlabel\*

\*ACHTUNG

Original-Herstellerinformationen/Original-Herstellerlabel gilt nur für alle erstmalig eingesandten Medizinprodukte. Ohne Originalhersteller-Label ist keine Aufbereitung möglich.

### 4 Übergabeschein

Bitte stellen Sie sicher, dass ein unterschriebener Übergabeschein der Transportbox beiliegt.

### 5 Verschließen der Transportbox

Schließen Sie den Deckel der Transportbox und drücken Sie an der rechten und linken Stirnseite der geschlossenen Box je eine beiliegende Plombe in die dafür vorgesehene Öffnung. Die Transportbox ist nun zum Abholen bereit.