

## VORREINIGUNG

Sie benötigen keine Desinfektionsmittel! Die Vorreinigung erledigen Sie im Handumdrehen mit einem feuchten, fusselfreien Tuch. **Extra-Tipp:** für ein möglichst rückstandsfreies Lumen, den Katheter nach dem Eingriff am besten mit laufender Stand-by Spülung aus dem Patienten entfernen. **In das Handstück darf keine Flüssigkeit eindringen!**

**1.** Den Katheter unmittelbar nach Gebrauch mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abwischen.



**Wichtig:** Schutzhülse nicht vom Katheter abziehen, sondern auf dem Katheterschaft belassen, um Beschädigungen am Ballon zu vermeiden.



**Tipp:** Reinigen Sie die Zwischenräume in Ausgangsstellung (entspannter Stellung) und gebogener Stellung.



**Tipp:** Reinigen Sie von proximal nach distal (vom Griff zur Katheterspitze).

**2.** Das Lumen gründlich mit kaltem Wasser spülen. Achten Sie auch hier darauf, dass keine Flüssigkeit in das Handstück eindringt!



Verwenden Sie hierzu eine Luerkanüle und ziehen diese mit Leitungswasser auf. Spülen Sie den Katheter mit sanftem Druck.



Ziehen Sie die Luerkanüle anschließend mit Luft auf und wiederholen den Vorgang. Stellen Sie noch einmal sicher, dass sich keine sichtbaren Verschmutzungen auf dem Produkt befinden.



**3.** Katheter mit einem fusselfreien Tuch von proximal nach distal abtrocknen.

## VERPACKUNG

Bringen Sie den Katheter in **Ausgangsstellung („entspannter“ Zustand)** und legen Sie den Katheter in **lockeren Schleifen in den Sammelbeutel**. Verwenden Sie **nur einen Beutel pro Produkt**. **Vermeiden Sie Knicke**, indem Sie den Griff mit dem Lueranschluß in Richtung Beutelboden in den Sammelbeutel legen. **Neuprodukte unbedingt mit dem Original-Label** (Herstellerangaben) in den Sammelbeutel legen. Den Sammelbeutel verschließen und in die Vanguard-Sammelbox legen.



**VANGUARD AG** Landsberger Str. 266 • 12623 Berlin, Germany  
**Kontakt Kundenservice** 0800 219219 2 • [service@vanguard.de](mailto:service@vanguard.de)

Bei dem verwendeten Begriff bzw. Marke Arctic Front handelt es sich um eine geschützte Marke des Originalherstellers Medtronic CryoCath LP, H9H 5H3, Quebec, CA oder eines mit diesem verbundenen Unternehmen.