

Die folgende Anleitung erläutert die notwendigen Schritte im Krankenhaus, um eine ordnungsgemäße Vorbereitung und einen sicheren Transport der Medizinprodukte zu gewährleisten.

## Wichtige Hinweise

Beachten Sie die folgenden Punkte:

- > Bitte führen Sie die Vorreinigung im Krankenhaus unmittelbar nach dem Einsatz der Medizinprodukte durch, um schwer entfernbare Rückstände zu vermeiden.
- > Führen Sie die Vorbereitung sachgemäß durch und stellen Sie sicher, dass die Medizinprodukte nicht beschädigt werden.
- > Legen Sie bitte dem entsprechenden Medizinprodukt das Label des Originalherstellers/ Original-Herstellerinformationen bei.

## **Vorsicht**

Infektionsgefahr durch verwendete Medizinprodukte!

- > Behandeln und lagern Sie die Medizinprodukte gemäß den entsprechenden Schutzbestimmungen.
- > Benutzen Sie Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

## Vorbereitung und Prüfung

Sammeln und reinigen Sie nur vollständige und mechanisch unbeschädigte Medizinprodukte (ohne Kratzer, Risse, Knicke oder sonstige Beschädigungen).

## Reinigung

- > Vermeiden Sie Beschädigungen (Biegen von Schäften, Abknicken usw.).
- > Wischen Sie die Medizinprodukte unmittelbar nach Gebrauch mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab und verwenden Sie ausschließlich kaltes, klares Wasser. Das Abwischen soll von proximal nach distal erfolgen.
- > Bewegliche Teile sind in beiden Endpositionen zu reinigen.
- > Verwenden Sie keine Desinfektionsmittel und führen Sie keine thermische Desinfektion durch.
- > Im Falle von Kathetern mit Lumen sind die Lumen mit kaltem Wasser zu spülen. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeit in das Handstück gelangt.

## Trocknen

Wischen Sie das gereinigte Medizinprodukt sorgfältig mit einem fusselfreien Tuch von proximal nach distal ab. Trocknen Sie auch das Lumen von Kathetern oder anderen Medizinprodukten (z.B. mit einer Luerkanüle).

## Verpacken

- > Bringen Sie das vorgereinigte Medizinprodukt in die Ausgangsstellung („entspannter“ Zustand), bei Kathetern bilden Sie eine lockere Schleife.
- > Legen Sie das Produkt mit dem Label des Originalherstellers/ Original-Herstellerinformationen (Ref.-Nr., Chargen-Nr., Verfallsdatum) in den Sammelbeutel oder Karton (für transseptale Nadeln, Schleusen oder Ultraschallkatheter).
- > Bitte verwenden Sie nur einen Beutel pro Produkt.
- > Schließen Sie den Zipverschluss oder den Karton und legen Sie das vorbereitete Medizinprodukt in die Vanguard-Box.
- > Vermeiden Sie Knicke, indem Sie den Griff mit dem Lueranschluß in Richtung Beutelboden in den Sammelbeutel legen.
- > Im Falle der Ultraschallscheren, legen Sie die Ultraschallschere mit dem Klingenschlüssel in in einen Sammelbeutel (ohne den Schlüssel kann das Produkt nicht wiederhergestellt werden).

Allgemeines: Bitte legen Sie Katheter, immer nach oben und elektrische Anschlusskabel immer nach unten in die Vanguard-Sammelbox. Wenn Sie zwei Boxen geliefert bekommen, verwenden Sie bitte eine nur für empfindliche Medizinprodukte wie Katheter und die andere für unempfindlichere Medizinprodukte wie elektrische Anschlusskabel.

## Lagerung und Abholung

- Halten Sie bitte die Sammelbox stets geschlossen und öffnen Sie diese nur zum Einlegen der gereinigten Medizinprodukte.
- > Wenn die Box ausreichend gefüllt ist, legen Sie den vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Übergabeschein in die Vanguard-Box. Drücken Sie die beiliegenden Plomben jeweils rechts und links in die dafür vorgesehenen Öffnungen.
  - > Benachrichtigen Sie zur Abholung gegebenenfalls den Vanguard-Kundenservice.