

# INSTRUCCIONES PARA CAJAS DE TRANSPORTE

En tan solo 5 pasos listo para el envío

## 1 Caja de transporte

Utilice la caja de transporte para el almacenamiento y el transporte de los productos médicos utilizados en el paciente.

Anexos/contenido: albarán de entrega, bolsa e plástico transparente para embalar los productos más los precintos para cerrar la caja de transporte.

## 2 Preparación de los productos médicos

Limpie los productos médicos según las instrucciones para la preparación en el hospital.

## 3 Embalaje y etiquetado

Embale cada uno de los productos médicos limpiados previamente con las respectivas informaciones del fabricante original/etiquetas del fabricante original\* en la bolsa de plástico transparente prevista para ello. Compruebe la integridad de la caja de transporte:

- embalaje de los productos médicos
- Albarán de entrega
- informaciones del fabricante original/etiquetas del fabricante original\*

### \*ATENCIÓN

Las informaciones del fabricante original/etiquetas del fabricante original solo se aplican a los productos médicos enviados por primera vez. Sin la etiqueta del fabricante original no es posible la preparación.

## 4 Albarán de entrega

Asegúrese de que se adjunte un albarán de entrega firmado a la caja de transporte.

## 5 Cierre de la caja de transporte

Cierre la tapa de la caja de transporte y séllela con uno de los precintos adjuntos tanto en el lado frontal derecho como en el izquierdo de la caja cerrada en el orificio previsto para ello. La caja de transporte está lista para la recogida.

## 6 Envío

Coloque la caja de transporte en la bolsa de plástico transparente y ciérrela. La caja de transporte VANGUARD ya está lista para su recogida.