

Fecha de Recogida: _____

<<Emplazamiento>>

¡ATENCIÓN! ¡Si el boletín de entrega no está cumplimentado, no podrán procesarse sus productos sanitarios! Dépositelo en la caja de transporte.

N.º cliente:

N.º pedido:

Calle/n.º:

Información adicional
de la dirección:

CP/ciudad:

Departamento:

Persona de contacto:

Teléfono:

Le rogamos nos envíe:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bolsa de recogida (Collection bags) | <input type="checkbox"/> Tubos transportadores (Transport tubes) |
| <input type="checkbox"/> Precintos (Seals) | <input type="checkbox"/> Etiquetas adhesivas (Adhesive labels) |
| <input type="checkbox"/> Boletines de entrega (Hand-over notes) | <input type="checkbox"/> |

Por el presente confirmamos que en lo referente a los productos Sanitarios incluidos en la caja, se han cumplido las instrucciones impresas al dorso.

¡Sin la nota de transferencia firmada, no será posible registrar los productos sanitarios enviados!

Fecha

Firma del remitente

Las siguientes instrucciones explican los pasos necesarios en el hospital para llevar a cabo una preparación correcta y garantizar un transporte seguro de los productos médicos.

Notas importantes

Tenga en cuenta los siguientes puntos:

- > Lleve a cabo la limpieza previa en el hospital inmediatamente después de utilizar los productos médicos para evitar residuos difíciles de eliminar.
- > Realice la preparación correctamente y asegúrese de que los productos médicos no se dañen.
- > Adjunte al correspondiente producto médico la etiqueta del fabricante original/información del fabricante original.



Cuidado

¡Riesgo de infección debido a los productos médicos utilizados!

- > Trate y almacene los productos médicos según las disposiciones de protección correspondientes.
- > Utilice guantes de protección y gafas de protección.

Preparación y comprobación

Agrupe y limpie solo productos médicos completos y no dañados mecánicamente (sin arañazos, grietas, dobleces ni otros daños).

Limpieza

- > Evite daños (doblado de mangos, flexión, etc.).
- > Lave los productos médicos inmediatamente después del uso con un paño sin pelusa húmedo utilizando solo agua fría limpia.
- > La limpieza debe realizarse de proximal a distal.
- > Las piezas móviles deben limpiarse en las dos posiciones finales.
- > No utilice desinfectantes ni lleve a cabo ninguna desinfección térmica.
- > En el caso de catéteres con varios lúmenes, las luces deberán limpiarse con agua fría. Debe procurarse que no penetre líquido en la pieza manual.

Secado

Frote con cuidado el producto médico limpio con un paño sin pelusa de la zona proximal a distal. Seque también el lumen de los catéteres u otros productos médicos (p. ej. con una cánula Luer).

Embalaje

- > Coloque el producto médico limpiado previamente en la posición inicial (estado «relajado»); en los catéteres forme un bucle suelto.
- > Coloque el producto con la etiqueta del fabricante original/información del fabricante original (n.º ref., n.º de lote, fecha de caducidad) en la bolsa de recogida o caja (para agujas transeptales, vainas o catéteres de ultrasonidos).
- > Utilice solo una bolsa por producto.
- > Cierre el cierre de cremallera o la caja y coloque el producto médico preparado en la caja Vanguard.
- > Evite dobleces colocando el mango en la bolsa de recogida con la conexión Luer hacia el fondo de la bolsa de recogida.
- > En el caso de las tijeras ultrasónicas, coloque la tijera ultrasónica con la llave de cuchillas en una bolsa de recogida (sin la llave, el producto no se puede restaurar).

Información general: Coloque el catéter siempre hacia arriba y los cables de conexión eléctricos siempre hacia abajo en la caja de recogida Vanguard. Si se le suministran dos cajas, utilice una solo para productos médicos sensibles, como catéteres, y la otra para productos médicos menos sensibles, como cables de conexión eléctricos.

Almacenamiento y recogida

Mantenga la caja de recogida siempre cerrada y ábrala solo para colocar los productos médicos limpios.

- > Una vez la caja se haya llenado lo suficiente, coloque el boletín de entrega firmado y totalmente cumplimentado en la caja Vanguard. Presione los precintos adjuntos a derecha e izquierda respectivamente en los orificios previstos para ello.
- > En caso necesario, informe al servicio de atención al cliente Vanguard para la recogida.